



typ 02 týdenní dávkovač léků

- velikost dávkovače: 136×81×25 mm (d×š×v)
- kazeta na léky pro celý týden
- dostupná v několika barevných provedeních
- každý den je rozdělen na 3 části
RÁNO / POLEDNE / VEČER
- každá část týdne se otevírá samostatně pomocí vysunutí šoupátka

návod k použití

Dávkovač uchopíte do vodorovné polohy (popisky jednotlivých dnů jsou nahoře) a tahem ruky vysuňte šoupátko. Při prvním otevření je nutné použít větší sílu, při opakovaném otevření již půjde šoupátko vysunovat snadněji. Kazetu naplníte léky dle předpisu či doporučení a poté šoupátko zasuňte zpět až do jeho zaklapnutí.



typ 03 týdenní dávkovač léků

- velikost dávkovače: 200×100×25 mm (d×š×v)
- kazeta na léky pro celý týden
- každý den je rozdělen na 3 barevně odlišené části
RÁNO / POLEDNE / VEČER a lze ho z kazety vyjmout a používat samostatně jako denní dávkovač
- každá část dne se otevírá samostatně pomocí víčka

návod k použití

Dávkovač uchopíte do vodorovné polohy (popisky dnů jsou vlevo). Na denní zásobník zatlačte palcem ze strany od popisků směrem doprava a vysuňte jej z kazety. Víčko zásobníku otevřete tažením za výstupek směrem nahoru (výrobek je z v ysoce odolného plastu z důvodu delší životnosti, proto může být první otevření víčka obtížnější). Zásobník naplníte léky, víčka zaklapnete. Zásobník vsuňte do drážky na kazetě a zasuňte zpět do kazety.



typ 04 týdenní dávkovač léků

- velikost dávkovače: 175×125×20 mm (d×š×v)
- kazeta na léky pro celý týden
- dostupná v několika barevných provedeních
- každý jednotlivý den je rozdělen na 4 části
RÁNO / POLEDNE / VEČER / NOC a lze ho vyjmout a používat samostatně jako denní dávkovač
- každá část dne se otevírá samostatně pomocí víčka

návod k použití

Dávkovač uchopíte tak, aby popisky jednotlivých dnů byly na levé straně. Na spodní straně kazety je u každého dne otvor. Tímto otvorem zatlačte prstem na denní zásobník a vyjměte ho z kazety. Víčko zásobníku otevřete tažením za výstupek směrem nahoru. Zásobník naplníte léky, víčka zaklapnete a poté ho zatlačte zpět do kazety, až do jeho zaklapnutí. Postup opakujte pro každý další den.



typ 09 týdenní dávkovač léků

- velikost dávkovače: 175×125×20 mm (d×š×v)
- kazeta na léky pro celý týden
- dostupná v několika barevných provedeních
- každý jednotlivý den je rozdělen na 3 části
RÁNO / POLEDNE / VEČER a lze ho vyjmout a používat samostatně jako denní dávkovač
- každá část dne se otevírá samostatně pomocí víčka

návod k použití

Dávkovač uchopíte tak, aby popisky jednotlivých dnů byly na levé straně. Na spodní straně kazety je u každého dne otvor. Tímto otvorem zatlačte prstem na denní zásobník a vyjměte ho z kazety. Víčko zásobníku otevřete tažením za výstupek směrem nahoru. Zásobník naplníte léky, víčka zaklapnete a poté ho zatlačte zpět do kazety, až do jeho zaklapnutí. Postup opakujte pro každý další den.



Vyrobeno ze zdravotně nezávadného materiálu. Schváleno Státním zdravotním ústavem v Praze. V případě likvidace postupujte prosím v souladu se zákonem o odpadech.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, ani na škody způsobené nesprávným použitím výrobku.



typ 07 týdenní dávkovač léků

- velikost dávkovače: 140×30×20 mm (d×š×v)
- dávkovač na léky pro celý týden
- dostupný v několika barevných provedeních
- týden je rozdělen pomocí zkratk dnů na 7 částí
- každý den se otevírá samostatně pomocí víčka, zatímco ostatní dny zůstávají pečlivě uzavřeny
- možnost jednobarevného potisku (např. firemním logem)
- vhodné pro reklamní účely jak pro jednotlivce, tak pro zdravotnická či sociální zařízení, firmy nebo reklamní agentury
- praktické víceúčelové použití



návod k použití

Dávkovač uchopíte do rukou a táhnete za výstupek na víčku směrem nahoru. První otevírání víčka může být obtížnější. Dávkovač naplníte léky a víčko zaklapnete.

typ 03 denní dávkovač léků

- velikost dávkovače: 95×24×25 mm (d×š×v)
- dávkovač na léky na 1 den, který je rozdělen na 3 barevně odlišené části RÁNO / POLEDNE / VEČER
- každá část dne se otevírá samostatně pomocí víčka, zatímco ostatní části zůstávají pečlivě uzavřeny

návod k použití

Dávkovač uchopíte do rukou a táhnete za výstupek na víčku směrem nahoru. Výrobek je z vysoce odolného plastu z důvodu delší životnosti, proto může být první otevírání víčka obtížnější. Dávkovač naplníte léky a víčko zaklapnete.



typ 04 a typ 09 denní dávkovač léků

- velikost dávkovače: 110×22×20 mm (d×š×v)
- dávkovač na léky na 1 den dostupný v několika barevných provedeních
- den je rozdělen pomocí symbolů na 4 nebo 3 části RÁNO / POLEDNE / VEČER / NOC
- každá část dne se otevírá samostatně pomocí víčka, zatímco ostatní části zůstávají pečlivě uzavřeny
- vhodné pro reklamní účely s možností jednobarevného potisku (např. firemním logem)
- praktické víceúčelové použití

návod k použití

Dávkovač uchopíte do rukou a táhnete za výstupek na víčku směrem nahoru. Dávkovač naplníte léky a víčko zaklapnete.



typ 05 kapesní dávkovač léků

- velikost dávkovače: ø 50 mm, výška 15 mm
- cestovní forma dávkovače na léky vhodná jako přívěšek na klíče
- dostupný v několika barevných kombinacích
- dávkovač je rozdělen na 2 části
- možnost jednobarevného potisku (např. firemním logem)
- vhodné pro reklamní účely jak pro jednotlivce, tak pro zdravotnická či sociální zařízení, firmy nebo reklamní agentury
- praktické víceúčelové použití

návod k použití

Dávkovač uchopíte prsty obou rukou a pootočte proti sobě víčko a dno. Vložte léky a dávkovač otočením zavřete.



víceúčelová dentální dóza

- velikost dózy: ø 98 mm, výška 72 mm
- víceúčelová dentální dóza určená k odkládání a čištění zubních protéz a dětských rovnátek
- dostupná v několika barevných kombinacích
- skládá se ze 3 částí – misky, ponorného sítka a víčka
- využitelná v široké škále dalších oborů jako je zdravotnictví, laboratoře, kosmetika, kuchyně atd.

návod k použití

Zubní protézu (dětská rovnátka) očistíme kartáčkem, opláchneme a vložíme do dózy. Při použití čistících tablet vložíme výrobcem doporučený počet tablet na dno dózy. Zubní protézu (rovnátka), umístěnou v ponorném sítku, vsuneme do dózy a zalijeme teplou vodou, až je úplně ponořena. Přiklopíme víčkem a necháme působit. Před použitím protézu (rovnátka) propláchneme pod tekoucí vodou.



výrobky pro reklamní účely

- kvalitní české výrobky pro všechny věkové kategorie
- originální moderní design a různá barevná provedení
- vhodné jak pro jednotlivce, tak pro zdravotnická či sociální zařízení, firmy, reklamní agentury, fitness či organizátory výstav, veletrhů a seminářů
- možnost jednobarevného potisku (např. logem Vaší společnosti)
- bez potisku i v malých množstvích
- krátká dodací lhůta
- praktické víceúčelové použití

